


Mode d'emploi
Version mai 2011

CARTE À TIQUES

SafeCard

La carte à tiques sert à retirer une tique en cas de morsure.

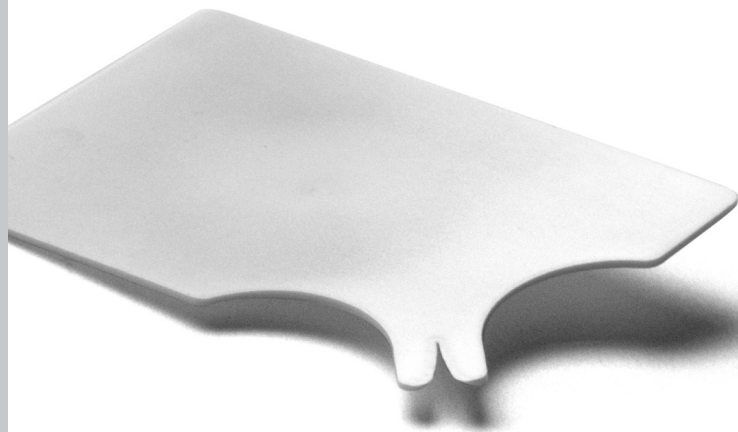

SOMMAIRE

01	Introduction	2
02	Conditions d'utilisation	2
03	Consignes générales de sécurité	3
04	Utilisation	3
05	Nettoyage	3
06	Élimination et remplacement	3
07	Importateur, fournisseur et service après-vente	4

01 INTRODUCTION

La borréliose ou maladie de Lyme et la méningite virale FSME sont transmises par les tiques. En cas de morsure, il importe de retirer rapidement la tique afin de diminuer le risque de transmission de l'agent pathogène et de maladie.

La carte à tiques permet de retirer les tiques sans effort en cas de morsure.

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation, de le conserver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.

02 CONDITIONS D'UTILISATION

La carte à tiques est exclusivement destinée à un usage privé.

03 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Signification de la mention d'avertissement utilisée dans le mode d'emploi qui suit :

➔ REMARQUE

Consignes d'utilisation et autres informations utiles.

➔ REMARQUE

Surveillez l'apparition d'une éventuelle rougeur autour de la piqûre quelques semaines après le retrait de la tique, ainsi que les symptômes grippaux, maux de tête ou autres symptômes et consultez un médecin au moindre soupçon.

Vous trouverez des informations sur les tiques, la protection contre les tiques, la FSME et la borréliose, ainsi que des cartes des régions à risque de FSME sur Internet, p. ex. à l'adresse www.latique.ch. Pour toute question supplémentaire, adressez-vous à votre médecin.

04 UTILISATION

1. Passez le « bec » de la carte sous la tique (schéma 1) et sortez-la en glissant d'un geste calme (schéma 2).
2. Désinfectez l'endroit de la piqûre afin d'éviter toute inflammation.
3. Notez la date de la piqûre.



schéma 1



schéma 2

05 NETTOYAGE

La carte à tiques peut être réutilisée plusieurs fois. Nettoyez-la soigneusement avec de l'eau chaude et du savon après chaque utilisation.

06 ÉLIMINATION ET REMPLACEMENT

Les cartes à tiques peuvent être jetées avec les déchets domestiques.

Vous pouvez commander de nouvelles cartes à tiques auprès de careware.



07 IMPORTATEUR, FOURNISSEUR ET SERVICE APRÈS-VENTE

Importateur

SafeCard ApS

Hem Odde

8660 Skanderborg

Danemark

Fournisseur et service après-vente

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Suisse

Service clientèle : 00800 33 800 800

service.clientele@careware.ch

www.careware.ch